

REOX
young mind dental people

Art Oral Ceramics

by Klaus Mütterthies



Art Oral
by Klaus Mütterthies

REOX
young mind dental people

PHILOSOPHIE *Art Oral*

Die Keramik ist die Visitenkarte sowohl für der Zahntechniker als auch für den Zahnarzt, Keramik ist die Königin der Ästhetik in unseren Laboren und ein wiedergefundenes Lächeln für unseren Patienten!

Sie sollte schnell , einfach und ästhetisch sein, vor allem sollte sie aber den Referenten und Personen all diese Eigenschaften vermitteln und weitergeben können. Mit dieser Philosophie ist Art Oral Ceramic entstanden.

Art Oral Ceramic Zr-Km ist nicht nur ein Pulver, sie ist eine Mischung aus Erfahrung-hi- tech und Liebe, die diese Komponente gemixt hat und ein Produkt hergeben, das dem Zahntechniker Freude an der Arbeit gibt und die Begeisterung wachsen lässt, jeden Tag was Neues zu versuchen und zu produzieren.

Die hervorragende Arbeit und Unterstützung von Klaus Mütterthies und das Verlangen nach immer neuem Erfolg haben das Konzept geschlossen.

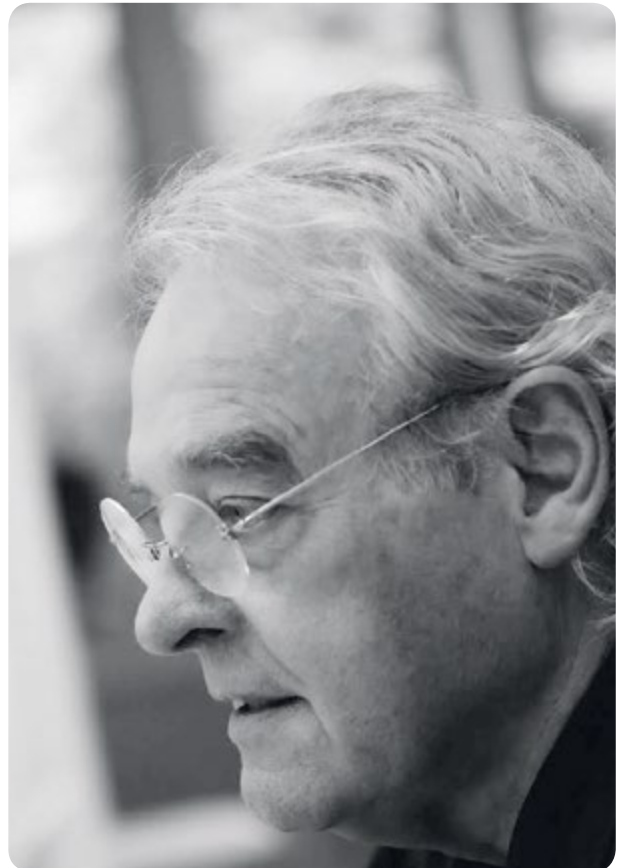


foto: Michele Orefice

FORTBILDUNGEN

Art Oral



***“Wer aufhört zu lernen ist alt, egal ob er 20 oder 80 Jahre ist. Wer aber weiter dazu bereit ist zu lernen, bleibt jung.
Das Grösste im Leben ist unseren Geist-Kopf jung zu behalten”
(Henry Ford)***

Ständig nach vorne zu schauen und sich dabei zu verbessern, ist das Prinzip der Firma Reox und einer der Philosophien von Art Oral. Wir glauben fest daran, dass in der zahnmedizinischen Branche der Erfolg zu erreichen ist, wenn wir ein bisschen mehr geben als üblich, vor allem aber dem Kunde zuhören, das ist unser Ziel.

Deshalb ist unser zahntechnisches Schulungszentrum in Venedig entstanden, in welchem Fortbildungen für Zahntechniker auf der Suche nach immer neuen Verbesserungen und das Erreichen neuer Ziele organisiert werden.

In unserem Schulungszentrum in Venedig (Marcon) wirst du nicht nur Fortbildung, sondern auch die Italienische Gastfreundschaft in familiärer Atmosphäre finden.

Die Art Oral Referenten vermitteln mit Begeisterung, Professionalität und Einfachheit all diese Konzepte von der Philosophie Art Oral.



REOX
young mind dental people

www.artoralceramic.com

DIE VORTEILE

- schnell und einfach
- hohe Ästhetik
- geringe Schrumpfung!
- farbstabil
- wertstabil



Odt Michele Orefice



- W.A.K. Stabil
- hervorragende Modelliereigenschaften
- sehr glatte Oberfläche
- optimiertes Sortiment
- kompetentes Support Team

Art Oral Ceramic
by Giovanni Furno

ART ORAL ZR

Für Zircon-Lithium Disilicat-Titan-Titan Legierung

Art Oral ZR ist einfach, schnell ästhetisch und stabil dank eines speziellen Produktverfahrens, das uns ermöglicht hat, Leuzitkristalle auszuscheiden.

- Art Oral Zr kann auf Zirkon, Lithiumdisilikat und Titan-Legierungen verwendet werden.
- Nach 4 Dentinbrände bleibt der W.A.K. Wert der Keramik und die Farbe stabil, dank des Ausscheidens der Leuzitkristalle.
- Art Oral Zr hat eine hydrophile Oberflächeneigenschaft, die der des natürlichen Zahnschmelzes entspricht dank eines speziellen Herstellungsprozesses. Dies entsteht durch den Ionenaustausch mit dem Speichel, nachdem Art Oral Zr in der Mundhöhle platziert wurde.
- Brandtemperatur 765°C



Odt Michele Orefice



REOX
young mind dental people

www.artoralceramic.com


ART ORAL KM

Metall Keramik

- Kann gebrannt werden auf Legierungen mit einen W.A.K. Wert von 13,6 bis 15,2.
- Nach 4 Dentinbrände bleibt der W.A.K. Wert der Keramik dank der Kontrolle der Leuzitkristalle stabil.
- Art Oral Km hat eine hydrophile Oberflächeneigenschaft, die der des natürlichen Zahnschmelzes entspricht dank eines spezielles Herstellungsprozesses. Dies entsteht durch den Ionenaustausch mit dem Speichel, nachdem Art Oral Km in der Mundhöhle platziert wurde.
- Brandtemperatur 880° C



Odt Fabiano Bolzani

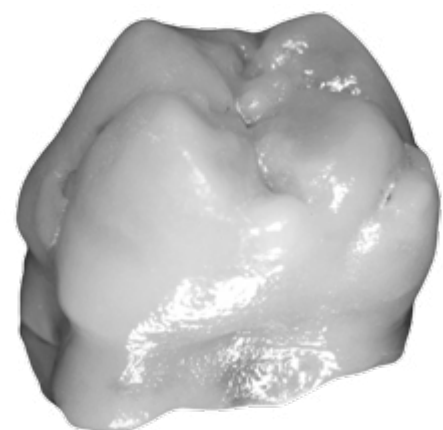

Odt Fabiano Bolzani

MONO ART

Monomasse

- Es kann verwendet werden bei Legierungen mit einen W.A.K. von 13,6 bis 15.2 (25-600°C).
- eine einzige Monomasse für alle Farben.
- schnell kostengünstig und sehr ästhetisch.
- zu verwenden mit allen Übertragungssystemen!
- ideal für Backenzähne und kostengünstige Rehabilitationen.
- mit Mono Art und seinen Massen können die 16 Farben der Vita®Farbring hergestellt werden.
- Das Metallgerüstdesign, die Oxidation von dieser und das Brennen von Pastenopaker erfolgen wie in der Brenntabelle von Art Oral Km.
- Die klassischen Vita®farben bekommen sie mit der Croma Arcobaleno A-D.
- Um einen Schneideeffekt zu bekommen, können die Malfarben Arcobaleno verwendet werden.




- 3 DENTINE (D-M-H) 20 gr.
- 4 Croma Malfarben Arcobaleno (A-B-C-D) 4 gr.
- 1 Modellierflüssigkeit 50 ml
- 1 Glaze Liquid 15 ml

ART ORAL GENGIVA ZAHNFLEISCHMASSEN

Anspruchvolle Implantatsversorgungen brauchen eine hochqualitative rosa Äesthetic sowohl für Zirkon als auch für die Metallkeramik, Art Oral gengiva ist ideal dafür.

9 Verschiedene Farbtöne

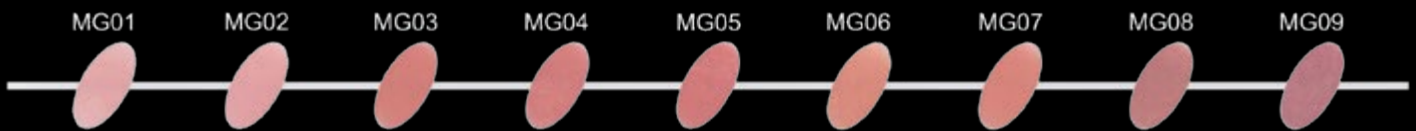

Odt Michele Orefice

MASTER KIT VENEERS

Von Klaus Mütterthies entwickelt für Keramikveneers.

- 6 DENTINE (BLEACH-A1-A2-A3- B1-B2) 20 gr.
- 1 Opakdentin (A2) 15 gr.
- 2 Schneidmassen (58-60) 20 gr.
- 2 Intensivdentine (GIALLO-ARANCIO) 15 gr.
- 5 Transpamassen (OPALE CHIARO-ARANCIO-AMBRA CIELO) 15 gr.
- 6 Arcobaleno Pulver (ARANCIO-CACHI MARRONE-VIOLA-CARTA DA ZUCCHERO-NERO) 4 gr.

- Modellierflüssigkeit 50 ml.
- Glaze Liquid 15 ml.
- Pinsel KOLINSKY S



Odt Fabiano Bolzani



MALFARBEN ARCOBALENO

by Klaus Mütterthies

- Fluorisierend
- in pulver
- in paste
- für Metall-keramik
- für Zirkon



CUTBACK KIT

Cad Cam Systeme erlauben heutzutage verschiedene Arten von Zahnformen und -strukturen, eine davon ist der sogenannte Cut Back Form. Die Firma Reox hat deshalb ein Sortiment (Cut Back Kit) entwickelt mit wenig Massen, nämlich: Schneidmassen, Transpamassen und Effektmassen; das ästhetische Resultat ist hervorragend.

Deshalb wurde Art Oral Cut Back Kit entwickelt, um eine schnelle und ästhetische Versorgung zu haben.




- 5 Schneide Massen (BLEACH-57-58-59- 60) 20 gr.
- 5 Transpa Massen (CIELO-OPALE CHIARO-ARANCIO-AMBRA)
- 1 Dentin BLEACH 20 gr.
- 1 Intensivdentine (BIANCO) 15 gr.
- 1 Fluorisierendedentine (DF2) 15 gr.
- 1 Pasten Glasur 4 gr.
- 1 Modellierflüssigkeit 50 ml

REOX
young mind dental people


www.artoralceramic.com

GESAMTSORTIMENT ART ORAL ZR/KM


DENTINE

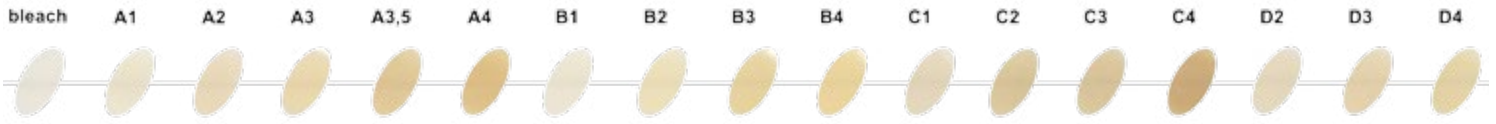


OPAK DENTINE

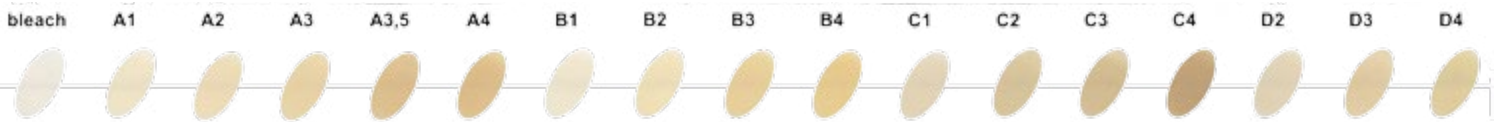

SCHNEIDEMASSEN

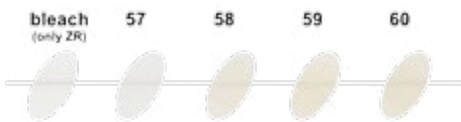

TRANSPAMASSEN

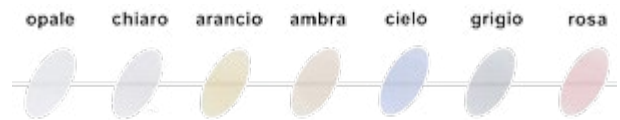

KIT ART ORAL ZR

COMPLETE KIT

- 6 LINER (40-50-60-70-90-N) 4 gr.
- 16 DENTINE 20 gr.
- 16 OPAK DENTINE 15 gr.
- 7 TRANSPAMASSEN 15 gr.
- 4 FLUORISIERENDE DENTINE 15 gr.
- 7 INTENSIV DENTINE 15 gr.
- 1 KORREKTUR SCHNEIDE 15 gr.
- 4 CROMA DENTINE 15 gr.
- 1 PULVER GLAZE 15 gr.
- 1 MODELLIER FLÜSSIGKEIT 50 ml.
- 1 GLAZE LIQUID 15 ml.
- 1 LINER LIQUID 15 ml.
- 1 PINSEL KOLINSKY S
- POLO SHIRT

5 FARBEN KIT ART ORAL ZR

- LINERS 4 gr. 40-50-60-70-N
- DENTINE 20 gr. A2 - A3 - B2 - C2 - D2
- OPAK DENTINE 15 gr. A2 - A3 - B2 - C2 - D2
- TRANSPAMASSEN 15 gr. OPALE - CHIARO - CIELO
- SCHNEIDEMASSEN 20 gr. 57 - 58
- GLAZE IN PASTE
- GLAZE LIQUID
- LINER LIQUID
- KORREKTUR SCHNEIDE
- PINSEL KOLINSKY S
- POLO SHIRT

INTRO KIT ART ORAL ZR

- LINER 50 4 gr.
- DENTINE A3 10 gr.
- OPAK DENTIN A3 10 gr.
- SCHNEIDE 58 10 gr.

KORREKTURMASSEN



Odt Pietro Meneghin


FLUORISIERENDE DENTINE



INTENSIV DENTINE



CROMA DENTINE

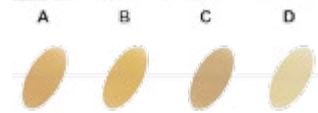

SCHULTER MASSEN



KIT ART ORAL KM

COMPLETE KIT

- 16 PASTEN OPAKER
- 16 DENTINE 20 gr.
- 16 OPAK DENTINE 15 gr.
- 7 TRANSPAMASSEN 15 gr.
- 4 FLUORISIERENDE DENTINE 15 gr.
- 7 INTENSIV DENTINE 15 gr.
- 1 KORRUKTUR SCHNEIDE 15 gr.
- 4 CROMA DENTINE 15 gr.
- OPAK LIQUID
- 1 PULVER GLAZE 15 gr.
- 1 MODELLIER FLÜSSIG KEIT 50 ml.
- 1 GLAZE LIQUID 15 ml.
- 1 PINSEL KOLINSKY S
- POLO SHIRT

5 FARBEN KIT ART ORAL ZR

- PASTEN OPAKER A2-A3-B2-C2-D2
- DENTINE 20 gr. A2 - A3 - B2 - C2 - D2
- OPAK DENTINE 15 gr. A2 - A3 - B2 - C2 - D2
- TRANSPAMASSEN 15 gr. OPALE - CHIARO - CIELO
- SCHNEIDEMASSEN 20 gr. 57 - 58
- GLAZE IN PASTE
- GLAZE LIQUID
- KORREKTUR SCHNEIDE
- PINSEL KOLINSKY S
- POLO SHIRT

INTRO KIT ART ORAL ZR

- PASTEN OPAKER A3 4 gr.
- DENTIN A3 10 gr.
- OPAK DENTIN A3 10 gr.
- SCHNEIDE 58 10 gr.
- GLAZE IN PASTE 4 gr.
- MODELLIER FLÜSSIGKEIT 50 ml.



Odt Pietro Meneghin

REOX

young mind dental people

Art Oral

by Klaus Mütterthies



Reox S.r.l. - Via delle Industrie 29H - Marcon, Venezia - Italy
tel +39 041 59 52 896 / info@reox.it

www.artoralceramic.com



Join us on Facebook "Reox Art Oral Ceramic"